

скорочено до однієї третини у порівнянні з іншими традиційними композитними матеріалами. Зверніть увагу на таблицю, яка буде показувати залежність часу полімеризації від товщини шару матеріалу (**■**ВКАЗІВКИ ПО ВНЕСЕННЮ І ПОЛІМЕРИЗАЦІЇ).

3) Радикал-посилена система активації полімеризації забезпечує більш довгий робочий час матеріалу ESTELITE POSTERIOR / ЕСТЕЛАЙТ ПАСТЕРІО.

4) ESTELITE POSTERIOR / ЕСТЕЛАЙТ ПАСТЕРІО випускається в шприцах.

■ВІДТІНКИ

PCE, PA1, PA2, PA3.

- Всі відтінки для ESTELITE POSTERIOR / ЕСТЕЛАЙТ ПАСТЕРІО мають адекватну ступінь прозорості, необхідну для використання при реставрації бічних зубів.

- PCE може бути використано як верхній шар при багатвідтінкової реставрації.
- Компанія Tokuyama Dental Corporation не виробляє шкалу відтінків для ESTELITE POSTERIOR / ЕСТЕЛАЙТ ПАСТЕРІО. При використанні ESTELITE POSTERIOR / ЕСТЕЛАЙТ ПАСТЕРІО зробіть макет шкали відтінків.

■ПОКАЗАННЯ

- Пряме відновлення бічних зубів, включаючи оклюзійну поверхню.

- Відновлення керамічних і композитних реставрацій.

■ПРОТИПОКАЗАННЯ

ESTELITE POSTERIOR / ЕСТЕЛАЙТ ПАСТЕРІО містить в собі метакрилатні мономери.

ESTELITE POSTERIOR / ЕСТЕЛАЙТ ПАСТЕРІО ПРОТИПОКАЗАНИЙ пацієнтам, у яких є алергія або підвищена чутливість до метакрилатів та схожим з ними мономерами.

■ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ

1) НЕ використовуйте ESTELITE POSTERIOR / ЕСТЕЛАЙТ ПАСТЕРІО в цілях, не зазначених даною інструкцією. Використовуйте ESTELITE POSTERIOR / ЕСТЕЛАЙТ ПАСТЕРІОзгідно з наведеними тут рекомендаціями.

2) ESTELITE POSTERIOR / ЕСТЕЛАЙТ ПАСТЕРІО призначений для використання і продажу тільки працівникам ліцензованих стоматологічних закладів. Даний матеріал не призначений для використання особами, які не є професійними стоматологами.

3) НЕ використовуйте ESTELITE POSTERIOR / ЕСТЕЛАЙТ ПАСТЕРІО, якщо захисні пломби на упаковці пошкоджені або є сумніви в їх справжності.

4) Якщо ESTELITE POSTERIOR / ЕСТЕЛАЙТ ПАСТЕРІО викликає у пацієнта алергічну реакцію або підвищену чутливість, слід негайно припинити використання препарату.

5) Щоб уникнути появи алергічної реакції на метакрилатні мономери рекомендується використання оглядових рукавичок (полімерних, вінілових або латексних) на всіх етапах роботи з матеріалом ESTELITE POSTERIOR / ЕСТЕЛАЙТ ПАСТЕРІО.

Примітка: деякі речовини / матеріали можуть проникати через оглядові рукавички. У разі контакту ESTELITE POSTERIOR / ЕСТЕЛАЙТ ПАСТЕРІО із оглядовими рукавичками, негайно зніміть їх і ретельно вимийте руки водою.

6) Не допускайте попадання ESTELITE POSTERIOR / ЕСТЕЛАЙТ ПАСТЕРІО в очі, на слизові оболонки, шкіру та одяг.

- У разі потраплення ESTELITE POSTERIOR / ЕСТЕЛАЙТ ПАСТЕРІО в очі, негайно промийте їх великою кількістю води і зверніться до офтальмолога.

- У разі потраплення ESTELITE POSTERIOR / ЕСТЕЛАЙТ ПАСТЕРІО на слизову оболонку,

- негайно протріть уражену область, а потім ретельно промийте великою кількістю води.

- У разі потраплення ESTELITE POSTERIOR / ЕСТЕЛАЙТ ПАСТЕРІО на шкіру або одяг, негайно очистіть уражену область ватним або марлевим тампоном, змоченим в етиловому спирті.

- Пацієнт повинен прополоскати рот відразу ж після лікування.

7) Не слід ковтати чи вдихати ESTELITE POSTERIOR / ЕСТЕЛАЙТ ПАСТЕРІО. Проковтування або вдихання матеріалу може завдати серйозної шкоди здоров'ю.

8) Щоб уникнути помилкового проковтування препарату ESTELITE POSTERIOR / ЕСТЕЛАЙТ ПАСТЕРІОне залишайте його в доступному для дітей та пацієнтів місці.

9) Обробляйте спиртом інструменти для пломбування після їх використання.

10) При використанні фотополімеризатора слід одягати захисні окуляри.

■ВКАЗІВКИ ПО ВНЕСЕННЮ І ПОЛІМЕРИЗАЦІЇ

Перш, ніж приступити до пломбування, уточніть та екстраорально фотополімеризатором перевірте час необхідний для повної полімеризації ESTELITE POSTERIOR / ЕСТЕЛАЙТ ПАСТЕРІО. У наведеній нижче таблиці показано взаємозв'язок між часом затвердівання і товщиною шару матеріалу.

Взаємозв'язок часу затвердівання з товщиною шару матеріалу:

Тип лампи	Потужність лампи (мВт/см²)	Час твердіння (секунди)	Товщина шару (мм) ¹
Галоген	400	10	1,9
		20	2,3
	600	10	2,0
		20	2,4
	800	5	1,8
		10	2,4
LED	260	10	1,9
		20	2,0
	900	5	1,8
		10	2,0
Плазма	950	3	2,1

1) Товщина шару матеріалу була встановлена на основі результатів тестів, вироблених відповідно до пункту 7.10 "Глибина полімеризації" стандарту ISO 4049 2000

■ЗБЕРІГАННЯ

1) Зберігати ESTELITE POSTERIOR / ЕСТЕЛАЙТ ПАСТЕРІО при температурі 0 - 25°C (32-77°F).

2) УНИКАТИ прямого впливу світла і високих температур.

3) НЕ використовувати ESTELITE POSTERIOR / ЕСТЕЛАЙТ ПАСТЕРІО після закінчення терміну придатності, зазначеного на шприці або упаковці.

■УТИЛІЗАЦІЯ

Для безпечного знищення залишків ESTELITE POSTERIOR / ЕСТЕЛАЙТ ПАСТЕРІО слід видалити невикористаний матеріал зі шприца та піддати його полімеризації перед тим, як викинути.

■РОБОТА З МАТЕРІАЛОМ

1. Очищення

Ретельно очистити поверхню зуба гумовою чашкою з пастою без вмісту фтору, а потім промити водою.

2. Вибір відтінку

Перед встановленням кофердаму виберіть відповідний відтінок ESTELITE POSTERIOR / ЕСТЕЛАЙТ ПАСТЕРІО.

- Відтінок необхідно вибрати протягом 5 хвилин (сухі зуби світліше, ніж зволожені).

- Насиченість білого (інтенсивність забарвлення) є найважливішим фактором у виборі відтінку.

- Якщо ви вагаєтесь між двома відтінками, вибирайте більш світлий відтінок (відтінок, що має найбільшу інтенсивність забарвлення).

- При роботі з відбіленими зубами підбір відтінку слід проводити через кілька тижнів після процедури відбілювання. Відбілені зуби можуть злегка потемніти.

3. Ізоляція

Кофердам є найкращим методом для ізоляції зуба.

4. Препарування порожнини

Відпреаруйте порожнину і промийте водою. Виконайте скоси по краю емалі при препаруванні бічних зубів (клас I, II), так як вони забезпечують зникнення границі між краєм порожнини і реставрацією, покращуючи естетичний аспект і ретенцію.

- При відновленні керамічних або композитних реставрацій, надайте поверхні шороховатість за допомогою алмазного бору для покращення зчеплення; з метою очищення протравіть поверхню зуба фосфорною кислотою; ретельно промийте водою; просушіть поверхню зуба і накладіть сілан (наприклад, Tokuso Ceramic Primer) відповідно до інструкції виробника.

5. Захист пульпи

У разі, якщо порожнина розташовується в безпосередній близькості до пульпи, слід накласти прокладку зі склоіономерного матеріалу або гідроксиду кальцію. Для захисту пульпи НЕ СЛІД використовувати матеріали на основі евгенолу, так як вони гальмують полімеризацію бондів і / або ESTELITE POSTERIOR / ЕСТЕЛАЙТ ПАСТЕРІО.

6. Адгезивна система

Нанесіть адгезивну систему відповідно до інструкції виробника.

7. Дозування

Зніміть ковпачок шприца. Повертаючи ручку за годинниковою стрілкою, видавіть пасту на планшет для замішування. Відразу після цього надіньте ковпачок на шприц.

- НЕ СЛІД прикладати зайвого зусилля до шприца, якщо він був тільки що виїнятий з холодильника.

8. Пломбування і контурування реставрації

Вносьте матеріал в порожнину пошарово. Шар матеріалу не повинен перевищувати зазначену глибину (звірити у вище наведеній таблиці).

- НЕ СЛІД змішувати ESTELITE POSTERIOR / ЕСТЕЛАЙТ ПАСТЕРІО з іншими видами композитних матеріалів чи іншими відтінками ESTELITE POSTERIOR / ЕСТЕЛАЙТ ПАСТЕРІО, щоб уникнути неповної полімеризації або утворення бульбашок повітря.

9. Полімеризація

Полімеризуйте кожен шар, як мінімум протягом рекомендованого часу (зверніться до наведеної вище таблиці), тримайте фотополімеризатор на відстані 2 мм від матеріалу.

- При використанні інших марок композитних матеріалів пошарово з затверділим композитом дотримуйтесь інструкції з використання цих матеріалів.

10. Фінішна обробка

Обробіть і відполіруйте реставрацію. Для фінішної обробки використовуйте алмазні бори дрібної зернистості. Для формування невидимої границі між композитом і природнім зубом, працюйте уздовж границі І2-гранним карбідним бором, без води і на малій швидкості. Використовуйте металеві або вінілові шліфувальні смужки для обробки проксимальних поверхонь. Для полірування використовуйте гумові головки чи будь-які інші полірувальні інструменти, такі як PoGoTM (DENTSPLY/ Caulk), Sof-LexTM (3M ESPE), Identoflex® HiLuster Dia Polishers (Kerr), або D-FINETM Hybrid Diamond (COSMEDENT, Inc.).

* PoGo, Sof-Lex, Identoflex і D-FINE не є зареєстрованими торговими марками компанії Tokuyama Dental Corporation.

ВАЖЛИВЕ ЗАУВАЖЕННЯ: виробник препарату ESTELITE POSTERIOR / ЕСТЕЛАЙТ ПАСТЕРІО не несе відповідальності за пошкодження або травми, викликані неправильним використанням даного препарату. Відповідальність за правильне застосування даного препарату лягає на користувача. Характеристики препарату ESTELITE POSTERIOR / ЕСТЕЛАЙТ ПАСТЕРІО можуть бути змінені без попереднього повідомлення. Зміна характеристик препарату може спричинити за собою зміну інструкції по застосуванню.

	Токуяма Дентал Корпорейшон 38-9, Taitou 1-хоме, Taitou-ku, Tokyo, 110-0016, Японія <p>тел: +81-3-3835-7201</p> URL :http://www.tokuyama-dental.com/
Уповноважений представник в Україні:	ТОВ «ІВОДЕНТ» <p>вул. Курінного Чорноти, 2, корпус 1, м. Івано-Франківськ, 76018, УКРАЇНА;</p> тел./ факс: +38 (034) 255 94 55 E-mail: info@ivodent.com.ua WEB: www.ivodent.com.ua
	Знак відповідності технічним регламентам та ідентифікаційний номер органу з оцінки відповідності

Дата останнього перегляду інструкції 2019/01



Manufacturer
Tokuyama Dental Corporation
38-9, Taitou 1-chome, Taitou-ku, Tokyo 110-0016, Japan
Tel: +81-3-3835-7201
URL: http://www.tokuyama-dental.com/